



Track-IT!

Track-IT! é uma interface para utilizadores com dificuldades motoras e possui várias opções programáveis que permitem ao utilizador personalizá-lo de acordo com as suas necessidades.

Categorias: Acesso ao Computador, Interfaces e Acessórios

Link: <https://anditec.pt/produto/track-it/>



Descrição

Track-IT! é uma interface para utilizadores com dificuldades motoras e possui várias opções programáveis que permitem ao utilizador personalizá-lo de acordo com as suas necessidades. Na sua essência, é um rato de varrimento. A direcção em que o cursor percorre pode ser facilmente seleccionada utilizando a matriz de LEDs “*clockface*” na parte da frente do dispositivo. Se estiver definido para um único manípulo, a unidade inicia um varrimento automático dos ponteiros direccionais, seguido pelas quatro definições do manípulo, finalizando na posição das 12 horas e assim por diante.

Quando o LED acende para a ação requerida, o utilizador pressiona o manípulo para parar o varrimento. Um segundo clique no manípulo irá executar essa ação, quer seja um movimento do cursor ou uma ação do manípulo. A ação pode ser realizada por qualquer período de tempo, mas após a falta de interação por um intervalo de tempo determinado (*Dwell Time*), o varrimento recomeça.

Quando o utilizador tem a destreza para utilização com dois manípulos, um manípulo serve para realizar o varrimento passo a passo e a ação destacada é efectuada quando o outro manípulo é premido. As restantes entradas (terceira e quarta para os manípulos) podem realizar acesso separado a ações como o clique esquerdo, clique direito, duplo clique ou arrastar, quando necessário.

Track-IT! é um produto especializado e não se adequa a todos os utilizadores. A sua utilização requer paciência. Contudo, para certos utilizadores, pode fornecer acesso ao cursor onde todos os outros dispositivos de assistência falham e, como tal, é um produto valioso no arsenal do avaliador.

Informações Adicionais

Características do **Track-IT!**:

- Funcionalidade completa do cursor a partir de um único manípulo;
- 4 entradas disponíveis (manípulos) para os utilizadores capazes de operar mais do que um manípulo;
- Matriz de LEDs a partir da qual selecciona a direcção do cursor;
- 8 direcções do cursor seleccionáveis, cada uma iluminada por um LED;
- 4 funções de clique do rato, cada uma delas iluminada por um LED;
- Ajustes de controlo de velocidade do cursor;
- Suporte de montagem para posicionamento próximo do ecrã do computador;
- Configurações de tempo variáveis para a matriz de LEDs e botões de clique do rato;
- Não requer software de instalação.

Downloads



[Manual de Utilizador \(Inglês\)](#)

Produtos Relacionados



Inproman 2

Adaptador que permite ligar até 2 manípulos a uma porta USB e utilizá-los com diferentes aplicações específicas que permitem acesso ao computador.

Link: <https://anditec.pt/produto/inproman-2/>



n-ABLER Trackball

O n-ABLER Trackball foi concebido para responder às necessidades dos utilizadores que tenham pouca coordenação óculo-motora, dificuldades na motricidade fina, espasmos involuntários, entre outras limitações.

Link: <https://anditec.pt/produto/n-abler-trackball/>



Jelly Beamer

Manípulo sem fios, indicado para brinquedos adaptados e acesso ao computador.

Link: <https://anditec.pt/produto/jelly-beamer/>



Joystick Optimax

O Optimax Joystick é um joystick de sem fios especificamente concebido para utilizadores com dificuldades motoras.

Link: <https://anditec.pt/produto/joystick-optimax/>