



TrackerPro 2

TrackerPro 2 permite a utilização do computador apenas com o movimento da cabeça.

Categorias: Acesso ao Computador, Alternativas ao Rato

Link: <https://anditec.pt/produto/trackerpro-2/>



Descrição

O **TrackerPro 2** proporciona um controlo fiável do rato para pessoas que não podem utilizar um rato tradicional de computador. Pode ser utilizado para aceder ao software de comunicação, navegar na Internet, ler um livro digital, escrever um e-mail, ou qualquer outra atividade que possa ser realizada num computador, tablet ou telefone.

O **TrackerPro 2** é *plug-and-play* e utiliza os controladores de rato padrão já instalados no seu dispositivo. Para começar, ligue o **TrackerPro 2** a um computador, tablet, ou telefone com uma porta USB tipo A. Um pequeno ponto refletor é colocado na testa, nariz, ou óculos do utilizador e pequenos movimentos da cabeça controlam o movimento do cursor do rato. Para cliques esquerdo e direito, pode utilizar dois manípulos (não incluídos) ou utilizar um software específico para realizar o clique automático (não incluído).

O **TrackerPro 2** é compatível com a maioria dos dispositivos Windows, macOS, Google Chrome, Android e iOS.

Informações Adicionais

O TrackerPro 2 inclui:

- Hardware TrackerPro 2 com conector USB Tipo A;
- Cabo de extensão 2 m USB tipo A;
- Suporte de montagem no topo da mesa;
- Suporte de montagem com duplo bloqueio e monitor;
- Duas entradas 3,5 mm;
- Pontos reflexivos;
- Guia de início rápido.

Downloads



[Manual de Utilizador \(Inglês\)](#) [Configurações no Windows 10 \(Inglês\)](#)

Produtos Relacionados



Jelly Beamer

Manípulo sem fios, indicado para brinquedos adaptados e acesso ao computador.

Link: <https://anditec.pt/produto/jelly-beamer/>



n-ABLER Joystick

É o joystick mais adaptável do mercado especificamente concebido para responder às necessidades dos utilizadores com controlo manual limitado, dificuldades motoras, má coordenação oculomotora, falta de destreza manual e espasmos musculares involuntários.

Link: <https://anditec.pt/produto/n-abler-joystick/>



Rato Adaptado

Realize atividades de causa e efeito com dois manípulos ligados no Rato Adaptado.

Link: <https://anditec.pt/produto/rato-adaptado/>



Joystick BJOY para Queixo

É a melhor alternativa para controlar o cursor do rato com o queixo. O seu pequeno tamanho, posição dos botões, precisão e todas as opções e possibilidades de montagem fazem deste joystick um dispositivo muito versátil.

Link: <https://anditec.pt/produto/joystick-bjoy-para-queixo/>